



Q-interactive®

Capítulo 1

Preparación de los iPads para Q-interactive

Q-interactive **Guía de usuario**

Septiembre 2023

Preparación de los iPads para Q-interactive **Capítulo 1**

Configuración de los ajustes del iPad para Q-interactive

Antes de que pueda administrar tests con Q-interactive, necesita completar estos pasos:

- **Configurar los ajustes de ambos iPads** para que:
 - a) Se emparejen correctamente para compartir estímulos y sincronizar datos entre ellos.
 - b) Se visualicen los estímulos de forma estandarizada.
 - c) Se reduzcan las distracciones que podrían interrumpir la sesión de evaluación.
- **Instalar la aplicación Q-interactive** en el App Store de Apple.

Las capturas de pantalla de este documento se han generado desde un iPad que funciona con iOS 16.4.1. Si está familiarizado con el iPad, puede configurar rápidamente el suyo con la *Lista de comprobación de configuración* del iPad de Q-interactive, que se encuentra [aquí](#).

Otros recursos:

La información de este capítulo también se presenta en el vídeo tutorial **Preparar sus iPads para Q-interactive**, que se encuentra en la pestaña Soporte de Central (es decir, qa.qiactive.com). También puede inscribirse a nuestro e-Learning desde [aquí](#).

Familiarizarse con el iPad

Parte frontal de su iPad:



A. Botón superior/Touch ID.

- B.
1. Para poner el iPad en reposo, pulse el botón.
 2. Para activar el iPad, pulse el botón y deslice el dedo por el botón Touch ID.
 3. Para apagar completamente el iPad, mantenga pulsado el botón junto al botón de subir volumen durante unos segundos hasta que aparezca el control deslizante, deslizando después para apagar en la parte superior de la pantalla.

B. Botones de volumen.

Estos botones controlan los sonidos de las aplicaciones, la reproducción de audio y vídeo.

C. Cámara frontal.

D. Micrófono.


El micrófono interno del iPad puede utilizarse para grabar las respuestas verbales del cliente en Q-interactive.

¿Cómo llegar a esta pantalla?

1. Pulse el botón desbloquear si está en reposo.
2. Desbloquee el iPad en caso de que tenga código o algún patrón de bloqueo.
3. En la pantalla de Inicio multitarea aparecen las aplicaciones recientes.

Preparación de los iPads para Q-interactive **Capítulo 1**

Parte trasera de su iPad:

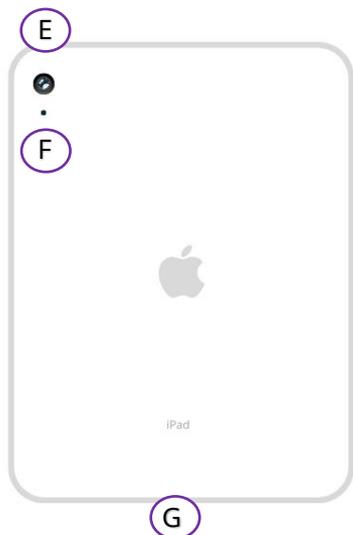

E. Cámara trasera.

F. Micrófono.

El micrófono interno del iPad puede utilizarse para grabar las respuestas verbales del cliente en Q-interactive.


G. Conector USB-C.

Use el conector para cargar su iPad.

Instalación de la aplicación *Q-interactive Assess*

Assess es una aplicación que se descarga desde el App Store de Apple. Debe instalar la aplicación *Q-interactive Assess* en **ambos iPads**.

- **Paso 1:** En la App Store, vaya a la barra de búsqueda situada en la parte superior derecha y escriba "Q interactive Assess". La app *Q-interactive Assess* aparecerá en la sección de Sugerencias.

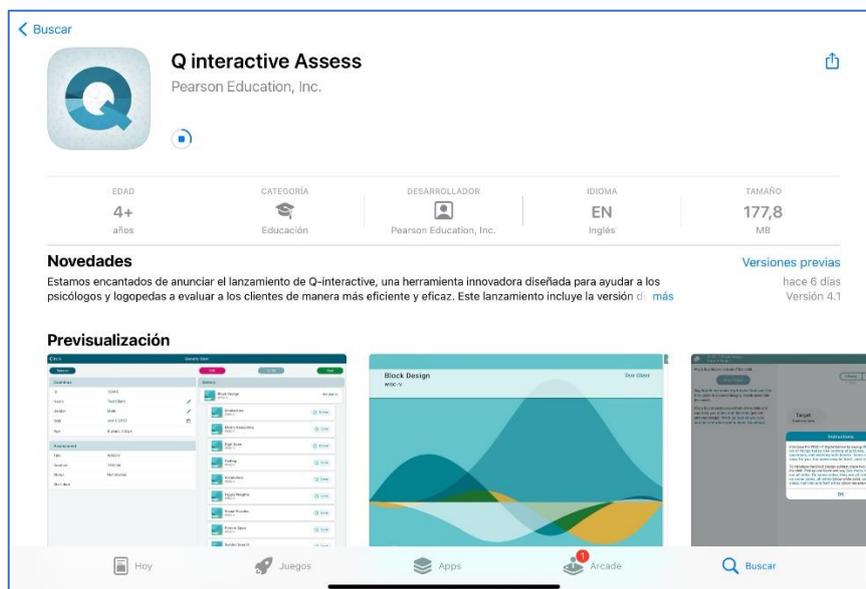

- **Paso 2:** Pulse "OBTENER" y, a continuación, introduzca sus credenciales de ID de Apple para descargar la aplicación.

Nota para los usuarios de iCloud: Por motivos de seguridad de los datos, *Q-interactive* almacena los datos en un archivo excluido intencionadamente de iCloud. Los datos de la evaluación no estarán permitidos en iCloud ni podrán sincronizarse con los servidores de Apple.

Preparación de los iPads para Q-interactive **Capítulo 1**


Ajustar la configuración del iPad para Q-interactive

Ajustar la configuración del iPad antes de utilizar Q-interactive le ayudará a garantizar que los estímulos se muestren de forma consistente durante la prueba, y a eliminar interrupciones durante la aplicación. Todos los ajustes se pueden llevar a cabo en la aplicación Ajustes.




Activar Wi-Fi. Q-interactive utiliza Wi-Fi para conectar los dispositivos del examinador y del evaluado. No es necesario estar conectado a una red Wi-Fi para la evaluación, pero sí es necesario tener Wi-Fi activado en ambos dispositivos. Para ello:

- **Paso 1:** Pulse Wi-Fi en el menú de la parte izquierda de la pantalla.
- **Paso 2:** Pulse el interruptor Wi-Fi en la parte derecha de la pantalla hasta que cambie de blanco a verde y aparezcan las opciones Wi-Fi y las opciones de Red. Pulse sobre una red. Una vez conectada, aparecerá una marca de verificación.

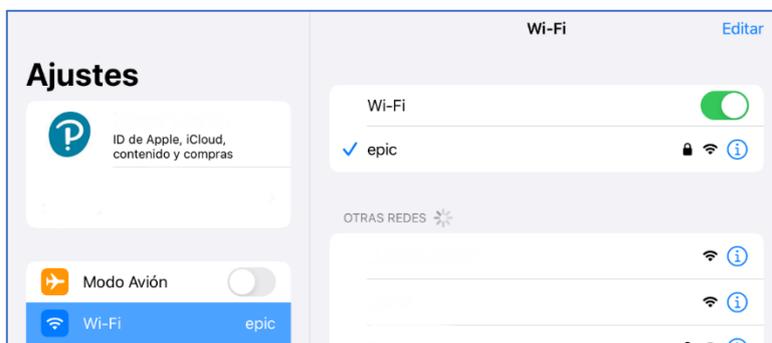


Desactivar gestos. Los gestos deben ser desactivados en el iPad del evaluado para evitar que el evaluado salga de la sesión de evaluación. Para desactivar los gestos, pulse "General" en el menú de la izquierda de la pantalla, seleccione la opción "Gestos" y, a continuación, pulse el interruptor de *Gestos Multitarea* y el de *Gestos de las Esquinas*, situado a la derecha de la pantalla hasta que aparezca en blanco.

Preparación de los iPads para Q-interactive **Capítulo 1**

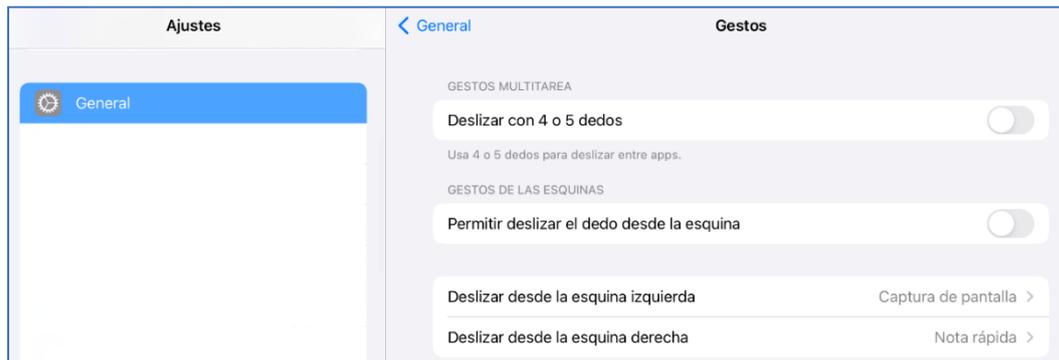


Desactive la autocorrección y las mayúsculas automáticas. Las credenciales de acceso a Q-interactive distinguen entre mayúsculas y minúsculas. La desactivación de estos dos ajustes ayuda a garantizar la precisión al introducir las credenciales de inicio de sesión y ayuda con una dificultad común en el inicio de sesión.

- **Paso 1:** Pulse “General” en el menú de la parte izquierda de la pantalla y, a continuación, seleccione Teclado en la parte derecha de la pantalla.

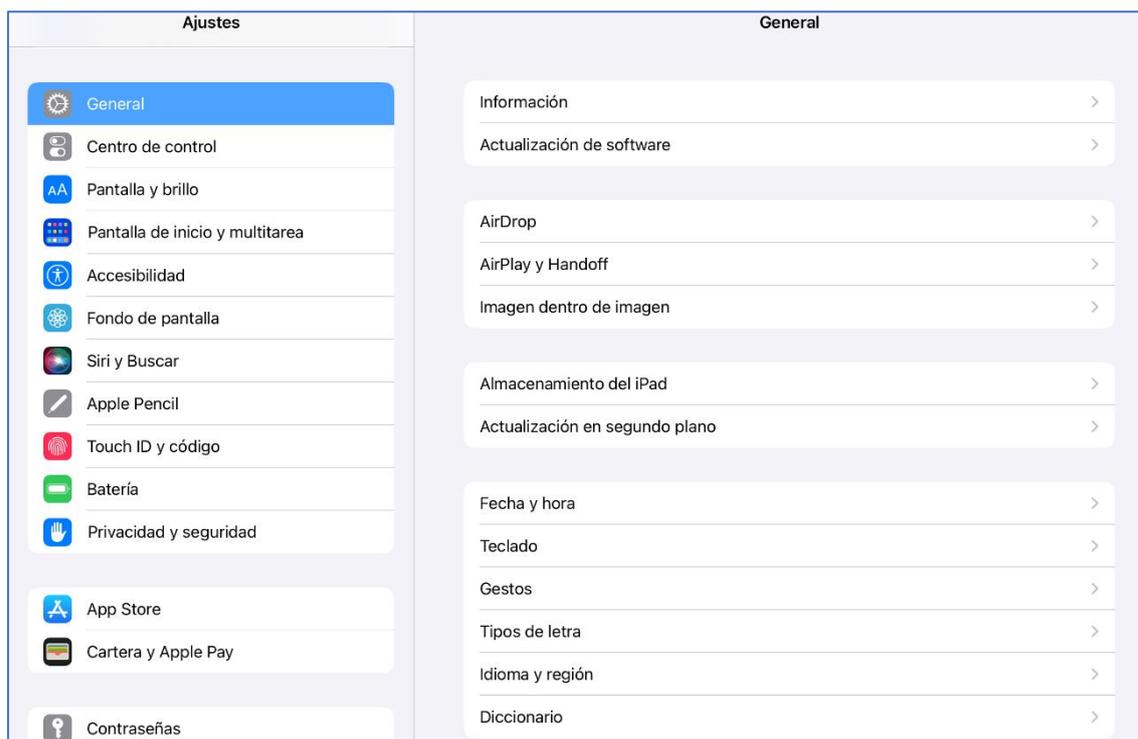

- **Paso 2:** Desactive las opciones “Mayúsculas automáticas” y “Autocorrección” tocando cada interruptor hasta que se vuelva blanco.

Preparación de los iPads para Q-interactive **Capítulo 1**

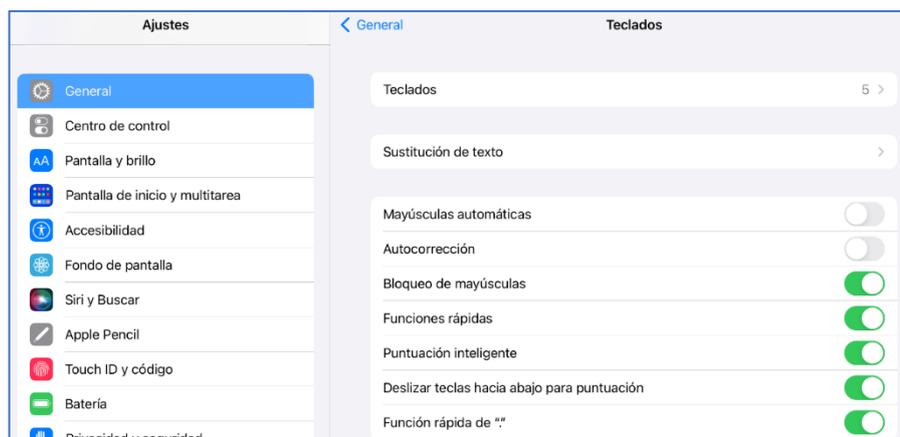

Configure el idioma y el formato de región. Q-interactive utiliza los ajustes de formato de idioma y región de su iPad para mostrar texto, fechas y otros valores en el formato correcto para su país. Esta información también se utiliza para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de su zona.


- **Paso 1:** Pulse “General” en la parte izquierda de la pantalla y, a continuación, desplácese por la parte derecha de la pantalla y pulse en “Idioma y región”.
- **Paso 2:** Ajuste el Idioma y la Región según sea necesario. Consulte “Añadir idioma” para seleccionar más opciones.



Ajustar la pantalla y el brillo. Maximice el brillo en el iPad del evaluado (es decir, el iPad que servirá como cuaderno de estímulos) y configure el bloqueo automático en 15 minutos en ambos iPads.


- **Paso 1:** Pulse “Pantalla y Brillo” en el menú de la izquierda de la pantalla.
- **Paso 2:** En la parte derecha de la pantalla, maximice el brillo deslizando el punto hacia la derecha, hasta que la línea sea de color azul sólido.
- **Paso 3:** Pulse la opción “Bloqueo automático”, y seleccione 15 minutos. Una marca de verificación aparecerá después de seleccionarla.

Preparación de los iPads para Q-interactive **Capítulo 1**

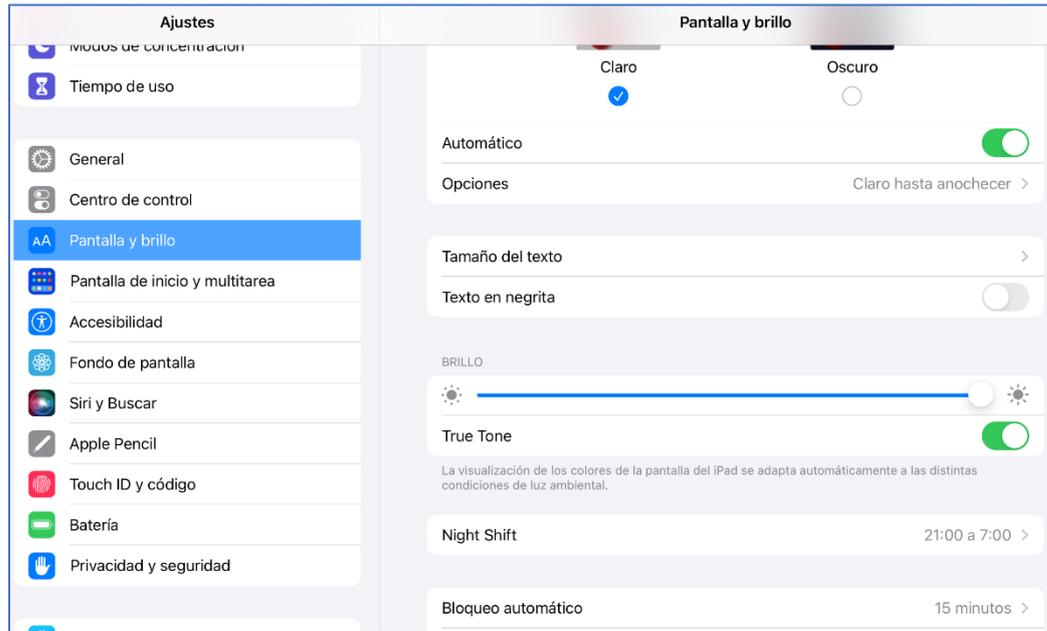

Desactive el brillo automático. En el iPad del evaluado, desactive la opción “Brillo automático”.

- **Paso 1:** Pulse sobre “General” en el menú de la izquierda de la pantalla.
- **Paso 2:** En la parte derecha de la pantalla, pulse sobre la opción “Accesibilidad” y, a continuación, la opción “Pantalla y tamaño del texto”.
- **Paso 3:** Desactive “Brillo automático”.

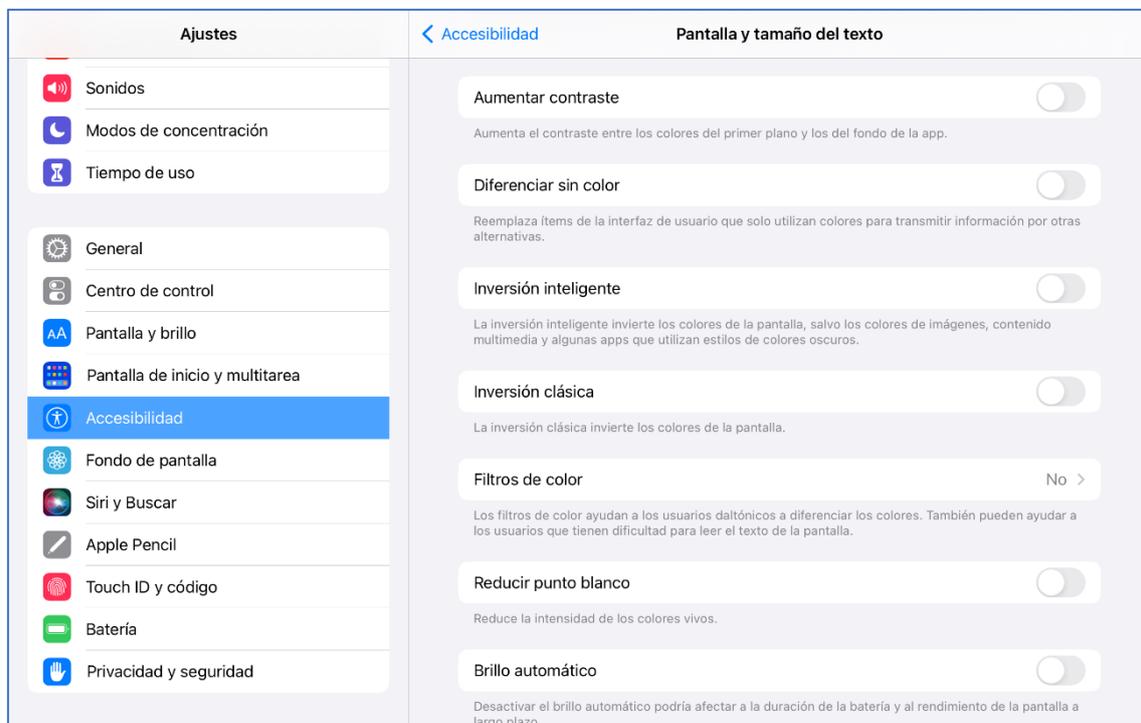


Preparación de los iPads para Q-interactive **Capítulo 1**


Cambiar el modo de aplicación. Q-interactive requiere dos iPads, cada uno con una finalidad específica.

Un iPad debe estar en *Modo Examinador* y el otro en *Modo Sujeto*.

- **Paso 1:** Desplácese hacia abajo por el menú de la izquierda de la pantalla. Busque Assess y tóquelo para abrir su menú de configuración.

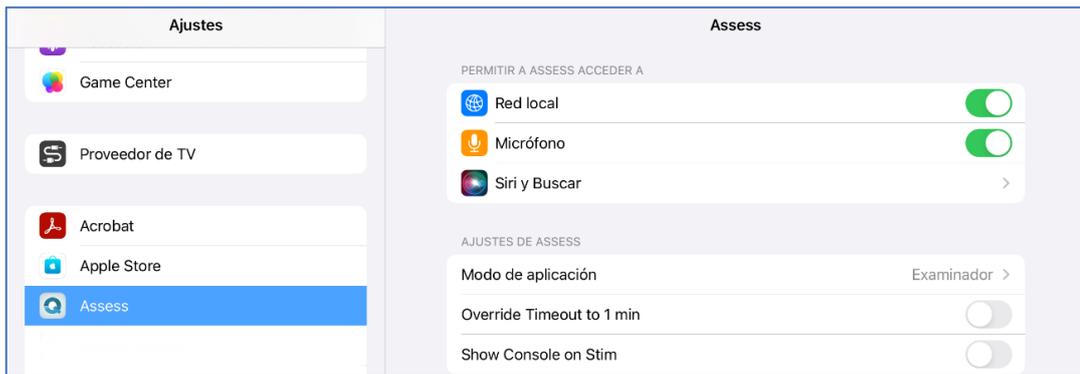


- **Paso 2:** En la parte derecha de la pantalla, pulse "Modo Aplicación".
- **Paso 3:** En un iPad, pulse "Examinador" hasta que aparezca una marca de verificación. En el otro iPad, pulse "Sujeto" hasta que aparezca una marca de verificación.

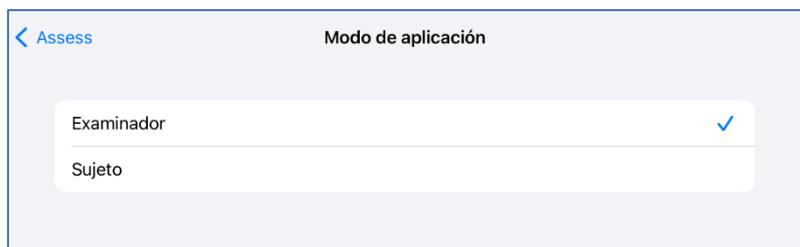

Nota para los usuarios de iPad Minis o iPad Pros: Para el dispositivo del evaluado debe utilizarse un iPad de tamaño estándar. Si utiliza un iPad Mini o un iPad Pro (el grande), debe designarse como Dispositivo del Examinador.

Desactive la captura de audio. Para las subpruebas que requieren respuestas verbales, Assess puede grabar las respuestas para reproducirse posteriormente para verificar la puntuación. Sin embargo, en algunos casos es posible que no pueda obtener el consentimiento de un evaluado para la grabación de audio.

- **Paso 1.** Pulse en Assess en el menú de la izquierda de la pantalla.
- **Paso 2:** Pulse el interruptor del Micrófono en la parte derecha de la pantalla hasta que cambie de verde a blanco.

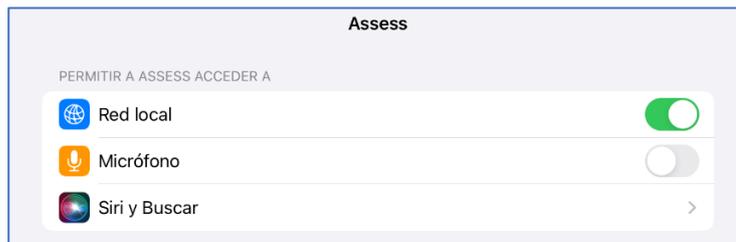

Nota: Sólo verá esta opción después de iniciar sesión en la aplicación.

Preparación de los iPads para Q-interactive **Capítulo 1**

Consejos de limpieza.

- Si es posible, las baterías deben estar completamente cargadas antes de iniciar una evaluación.
- No ejecute otras aplicaciones ni deje otras aplicaciones abiertas en el iPad durante una evaluación.
- Para un rendimiento óptimo, reinicie los iPads después de cada sesión de evaluación.

Lista de comprobación para la configuración del iPad Q-interactive.

Si está familiarizado con el uso de un iPad, puede configurar rápidamente el suyo con la siguiente lista de comprobación:

iPad del Examinador	iPad del Evaluado	Ajustes	Menú	Opción
x	x	 Wi-Fi	Wi-Fi	
	x	 General	Brillo automático (Pantalla y tamaño del texto)	
	x	 General	Gestos (Gestos multitarea y de las esquinas)	
x	x	 General	Mayúsculas automáticas (Teclado)	
x	x	 General	Autocorrección (Teclado)	
	x	 Pantalla y brillo	Deslizar hasta el final de la barra	
x	x	 Pantalla y brillo	Bloqueo automático	15 minutos
x		 Assess	Modo aplicación	Examinador
	x	 Assess	Modo aplicación	Evaluado